


レンズはあなたの目のよきパートナーです。
レンズの性質をよく理解して快適にお使いください。


休息は
やっぱり
布団の中が
いちばんですね。

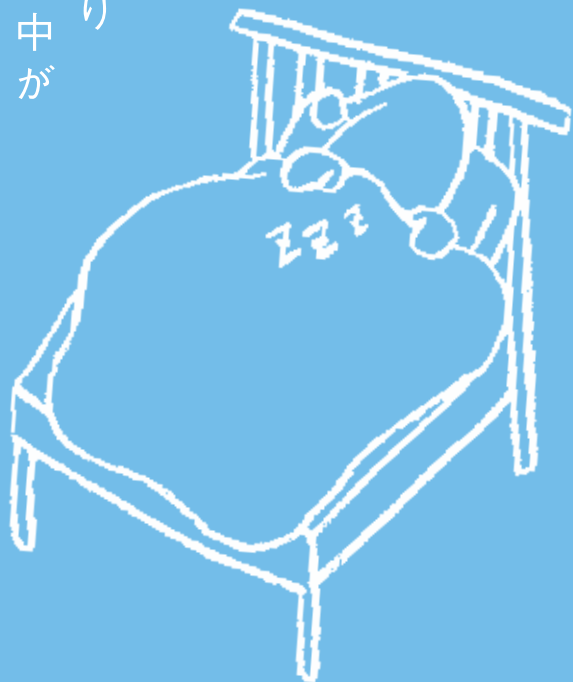

メガネの快適な休息場所は？

メガネを使用しないときは、専用のメガネケースにしまうか、
レンズ面を上にして安全な場所に置いてください。
できればメガネ拭きにくるんでレンズを
保護して収納すれば、キズを防ぐことができます。
無造作にテーブルの上に置いたり、
そのままポケットにしまい込んだりすることはさけてください。
人もメガネもおなじ。
快適な場所がいちばんの休息場所になります。


■カケ

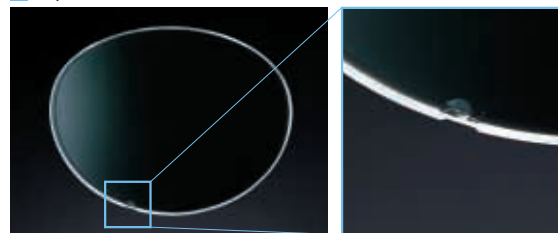

使わないときは、
メガネがいちばん
落ち着く場所に！

ふちなしメガネはレンズがフレームに保護されていないため、
硬い物にぶつけると、カケる場合がありますのでご注意ください。

■こすれキズ

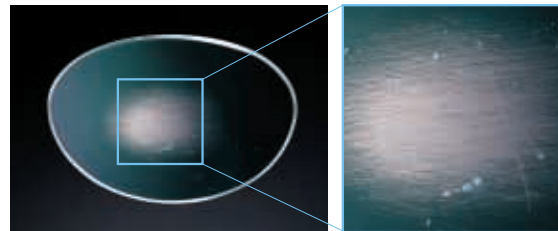

※掲載写真はレンズの状態をご理解いただくための一例です。