

機械器具 72 視力補正用眼鏡レンズ
一般医療機器 眼鏡レンズ 35957000 (JMDNコード)

ナイトグラスLED クリアジャケット

【禁忌・禁止】

- ・強い衝撃があれば破損し、破片で目や顔に重傷を負う可能性がありますので、衝撃にはご注意ください。
- ・併用される眼鏡によっては薄暮・夜間時の運転や路上使用に適さない場合があります。
- ・太陽や強い光を直視しないでください。

【形状・構造及び原理】



クリップ : 真鍮、エラストマー、ポリカーボネイト
レンズ : プラスチック製、屈折率1.60
レンズ度数 : -0.25D

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ1組とクリップオンパーツからなる視力補正用眼鏡レンズ。

【使用方法】

- ・上部のクリップを開閉し、眼鏡に取り付けて使用する製品。

【使用上の注意】

- ・本製品と併用される眼鏡によっては、薄暮・夜間時の運転や路上使用に適さない場合があります。
- ・ナイトグラスを使用中、見え方に違和感を感じた場合は使用を中止してください。
- ・車の中や砂浜など高温になる場所にメガネを放置しないで下さい。高温(60℃以上)にさらされたり、急激な温度変化にあうとレンズの変形や表面層のはがれ、ひび割れ等を生じることがあります。またレンズの変形により見え方に悪影響を及ぼす可能性があるため注意してください。
- ・プラスチックレンズも強い衝撃があれば破損・割れなどが発生する場合があります。またレンズに穴をあけているため、レンズ縁のあるフレームと比べてレンズが割れる可能性が高い製品です。丁寧に取り扱いってください。

- ・太陽や強い光を直視しないでください。目に重傷を負ったり、失明に至る場合もあります。
- ・見え方や使い方に慣れないうちは、運転や路上使用はメガネに慣れて違和感を感じなくなってから使用してください。
- ・レンズのキズやひび割れ等によって、見え方に違和感を感じたら直ちに使用を中止して、購入店にご相談ください。
- ・汗や果汁、整髪料や化粧品、薬剤等は変色等の原因となる場合があります。付着した場合はすぐに水洗いして付着物をよく落とし拭き取ってください。
- ・レンズの汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗い、そのあと水洗いをして拭き取ってください。アルカリ系の洗剤や酸性洗剤は使用しないでください。
- ・使用後はレンズや金具部分についた水分・汗・皮脂・化粧品類や、ゴミ・ホコリなどの汚れをよく拭き取って、ケースに入れて保管してください。
- ・使用されないときは、直射日光が当たる高温・高湿となるような場所は避け、清潔で乾燥した、尚且つ、幼児の手の届かない場所で保管してください。
- ・無理な状態で保管されますと、商品の変形・劣化・破損の原因となりますので避けてください。
- ・置く時はレンズの凸面を上向きにしてください。下向きにするとキズの原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ケースに入れ、直射日光の当たる場所は避けて保管する。
- ・持ち運ぶ際や使用しない場合は手入れをしたうえでケースに入れてください。
- ・レンズをキズ付ける恐れがあるので硬い金属等と一緒にしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 東海光学株式会社
愛知県岡崎市恵田町下田5番地26
電話 : 0564-27-3050
製造元 : 東海光学株式会社 本社工場

取扱説明書を必ずご参照ください