

機械器具 7 1 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 35065000 (JMDNコード)

ナイトグラスLED スマート

【禁忌・禁止】

- ・強い衝撃があれば破損し、破片で目や顔に重傷を負う可能性がありますので、衝撃にはご注意ください。
- ・併用される眼鏡によっては薄暮・夜間時の運転や路上使用に適さない場合があります。
- ・太陽や強い光を直視しないでください。

【形状・構造及び原理】



【原材料】

フレーム : プラスチック、ステンレス
レンズ : プラスチック製、屈折率1.60
レンズ度数: -0.25D

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- ・かけ外しの際は、両手でテンプル(つる)を持って顔に沿わせながら正面で行ってください。

* 【使用上の注意】

- ・車の中や砂浜など高温になる場所にメガネを放置しないで下さい。メガネが変形しフレームからレンズがはずれる場合があります。メガネはレンズ、フレームとも高温(60℃以上)にさらされたり、急激な温度変化にあうと変形や表面層のはがれ、ひび割れ等を生じることがあります。また熱によってレンズやフレームが変形し、見え方に悪影響を及ぼす可能性があるため注意してください。
- ・激しいスポーツ等に使用しますと接触したり、ぶつかったりした場合、眼や顔を負傷することがありますので使用しないでください。
- ・ナイトグラスを使用中、見え方に違和感を感じた場合は使用を中止

してください。

- ・フレームが肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹など異常がある時又は異常が現れた時には使用を止め、皮膚科の診察を受けてください。
- ・太陽や強い光を直視しないでください。目に重傷を負ったり、失明に至る場合もあります。
- ・メガネのかけ外しは、両手でテンプルを持って顔に沿わせながら正面で行ってください。テンプルは十分に開いてゆっくりかけ外してください。
- ・形くずれや緩みの原因になるので、片方のテンプルのみを持って無理に外さないでください。
- ・見え方や使い方に慣れないうちは、運転や路上使用はメガネに慣れて違和感を感じなくなってから使用してください。
- ・レンズのキズやひび割れ等によって、見え方に違和感を感じたら直ちに使用を中止して、購入店にご相談ください。
- ・汗や果汁、整髪料や化粧品、薬剤等は変色等の原因となる場合があります。付着した場合はすぐに水洗いして付着物をよく落とし拭き取ってください。
- ・レンズを拭く時はほこりを落とすか水洗いをしてください。水洗いした場合はティッシュペーパーで水気を取り、専用メガネ拭きで拭いてください。無理に力を入れて拭くとフレームの型くずれ及び素材の劣化による破損の原因になります。
- ・レンズの汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で洗い、そのあと水洗いをして拭き取ってください。アルカリ系の洗剤や酸性洗剤は使用しないでください。
- ・メガネを置く時は、レンズの凸面を上向きにしてください。下向きにするとキズの原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光の当たる場所は避けて保管してください。
- ・持ち運ぶ際や使用しない場合は手入れをしたうえでケースに入れてください。
- ・レンズをキズ付ける恐れがあるので硬い金属等と一緒にしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: 東海光学株式会社
愛知県岡崎市恵田町字下田5番地26
電話: 0564-27-3050
製造元: 東海光学株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください